

PRELEVINJEC

Sonde pour insémination sans seringue

CARACTÉRISTIQUES

Mini seringue constituée par :

- Un cylindre en polypropylène gradué ouvert dans la partie distale avec butée de positionnement sur laquelle est fixé un tube en polyéthylène.
- Un piston en résine d'acétal renforcé par un tube en acier inoxydable sur lequel est moulé un joint en polyéthylène.

UTILISATION


- Insémination Intra-utérine.

RECOMMANDATIONS

- Rincer préalablement avec un milieu de culture stérile.
- La mini seringue est préalablement chargée avec la préparation de sperme.
- Chaque graduation correspond à 100 µL.
- Pousser doucement la sonde dans le col.
- Procéder à l'insémination.

CONTRE INDICATION

- Infection génitale.

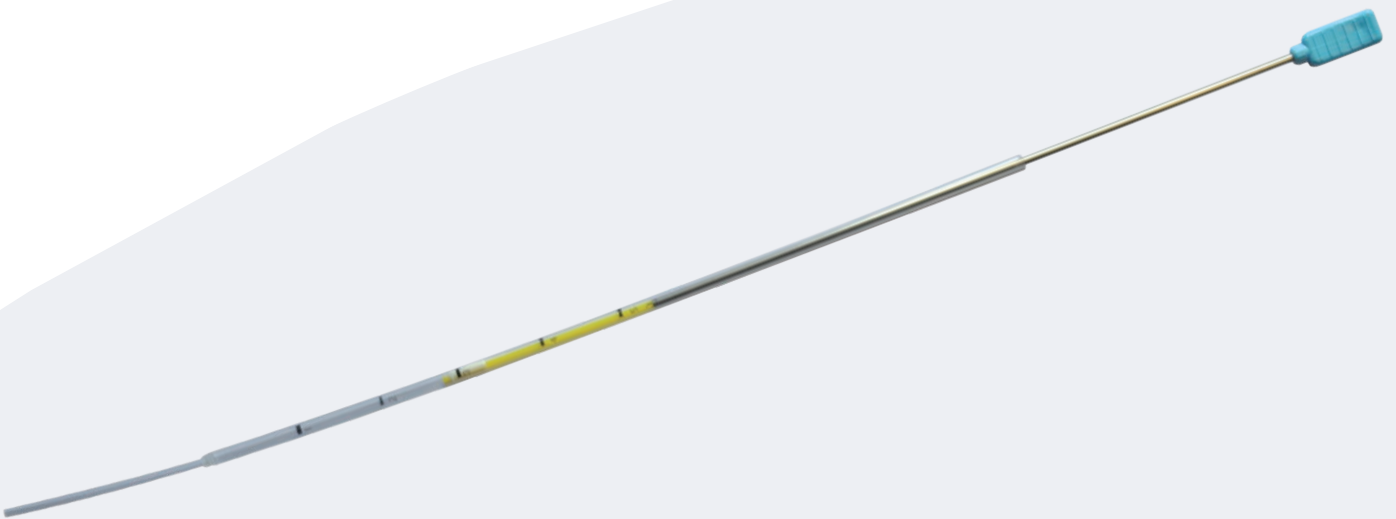

MA119

Référence	Conditionnement	Ø int.	Graduation	Stérilisation
PS1240623	Boîte de 25 unités Emballage individuel stérile	2.6 mm	100 µL	γ irradiation