

# ECHOCATH®

## Cathéter de transfert coudé échogène

### CARACTÉRISTIQUES

- Cathéter de transfert coudé permettant un passage facile du canal cervical.
- Dispositif médical stérile à usage unique en polyéthylène souple transparent.
- Flèches sur l'embase du cathéter indiquant le sens de la courbure.
- **Repérage facile grâce à l'extrémité distale échogène.**

### UTILISATION

- Transfert d'embryon(s).
- Insémination intra utérine.

### RECOMMANDATIONS


- Avant toute utilisation, il est recommandé de rincer le cathéter avec un milieu de culture stérile approprié.

#### Transfert d'embryons

- Placer les embryons dans ECHOCATH® avec une faible quantité de milieu de culture.
- Positionner la bague sur la graduation centimétrique selon la longueur de l'utérus.
- Introduire ECHOCATH® à environ 1 cm du fond utérin. En cas de passage difficile du col, effectuer délicatement une rotation du cathéter.
- Procéder au transfert d'embryon(s).
- Retirer doucement le cathéter.

#### Insémination intra utérine

- Aspirer la préparation de sperme avec ECHOCATH® connecté à une seringue.
- Introduire ECHOCATH® à environ 1 cm du fond utérin. En cas de passage difficile du col, effectuer délicatement une rotation du cathéter.
- Procéder à l'insémination.
- Retirer doucement le cathéter.

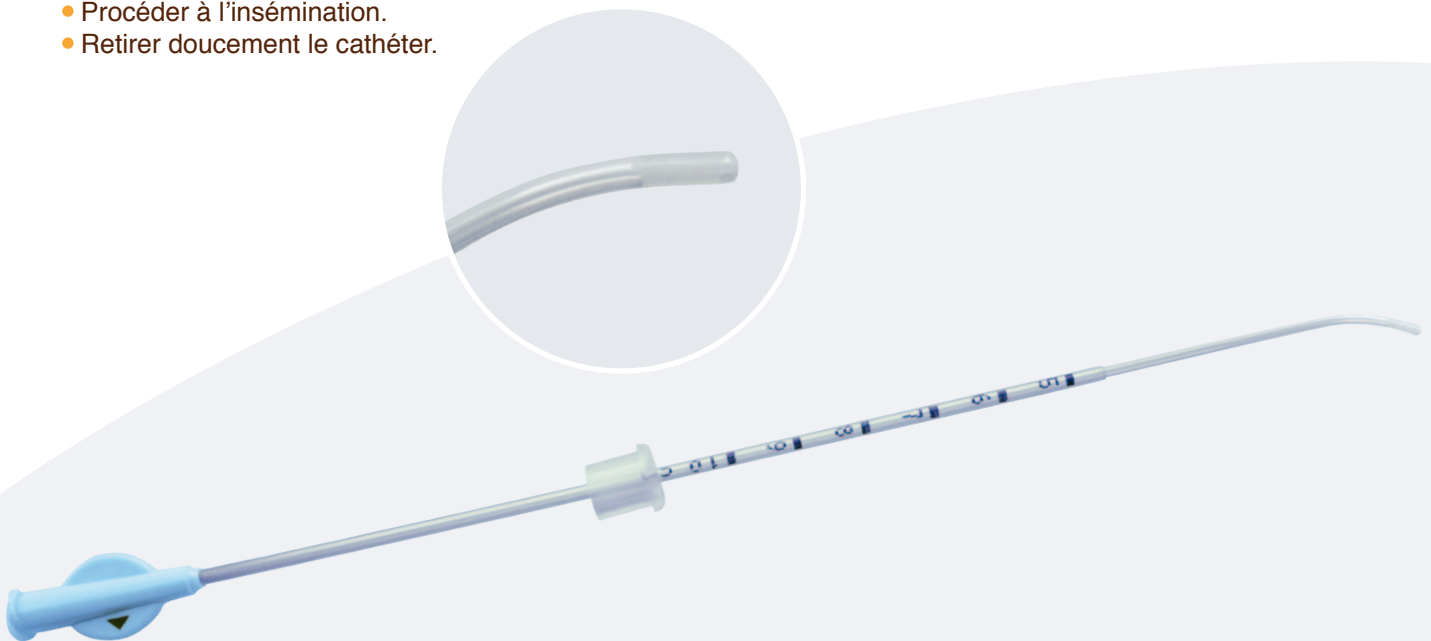

Référence	Désignation	Conditionnement	Ø int.	Longueur	Stérilisation
NS1280555	ECHOCATH®	Boîte de 25 unités Sachet individuel	1.1 mm	20.5 cm	γ irradiation