

PMIU

Cathéter pour insémination intra-utérine

CARACTÉRISTIQUES


- Dispositif médical stérile à usage unique comprenant un tube distal en polyéthylène avec 2 ouvertures latérales.
- Tube proximal en polypropylène gradué en cm.

UTILISATION

- Insémination intra-utérine.

RECOMMANDATIONS

- Avant toute utilisation, il est recommandé de rincer le cathéter avec un milieu de culture stérile approprié.
- Raccorder une seringue au PMIU.
- Aspirer le sperme préparé dans le cathéter.
- Engager puis pousser le cathéter PMIU dans le col.
- Procéder à l'insémination.
- Retirer doucement le cathéter.

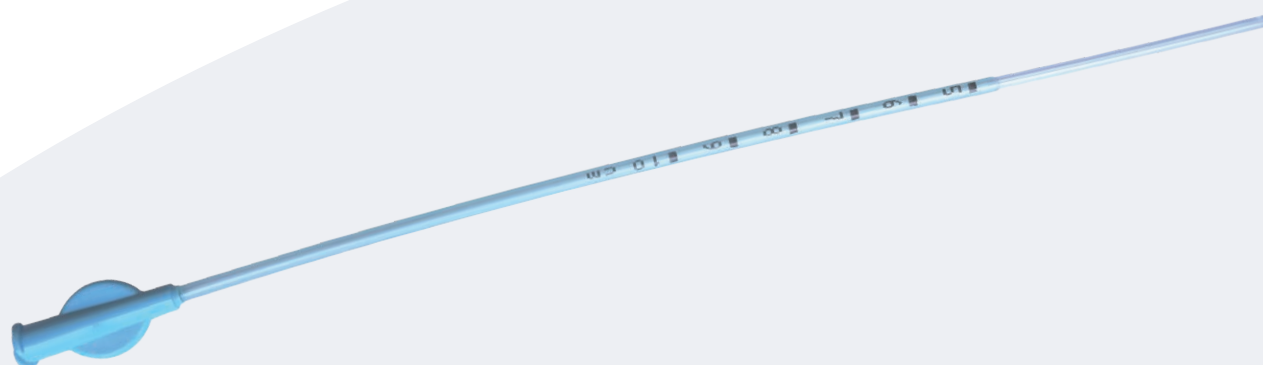

Référence	Désignation	Conditionnement	Volume (mL)	Ø int. (mm)	Ø ext.		Longueur totale (mm)	Stérilisation
					mm	CH		
PS1260600	PMIU	Boîte de 25 unités Emballage individuel stérile	0.40	1.6	2.1	6	205	γ irradiation