

AIGUILLE DE PONCTION D'OVOCYTES

Biseau back cut 17 G (diam. 1.4 mm) +/- mandrin

CARACTÉRISTIQUES

- Aiguille simple lumière.
- Biseau arrière (back cut). Talon émoussé.
- Deux zones échogènes **LASER** sur l'extrémité distale.
- Embase ergonomique de grande surface.
- Jeu de 4 étiquettes de traçabilité.


UTILISATION

- Ponction folliculaire sous échoguidage en vue d'une fécondation *in vitro*.
- Ponction de kystes ovariens.

RECOMMANDATIONS

- Rincer l'aiguille avec un milieu de culture stérile avant son utilisation.
- Fixer la seringue sur le cône luer.
- Procéder à la ponction sous échoguidage selon la voie choisie.

MA119

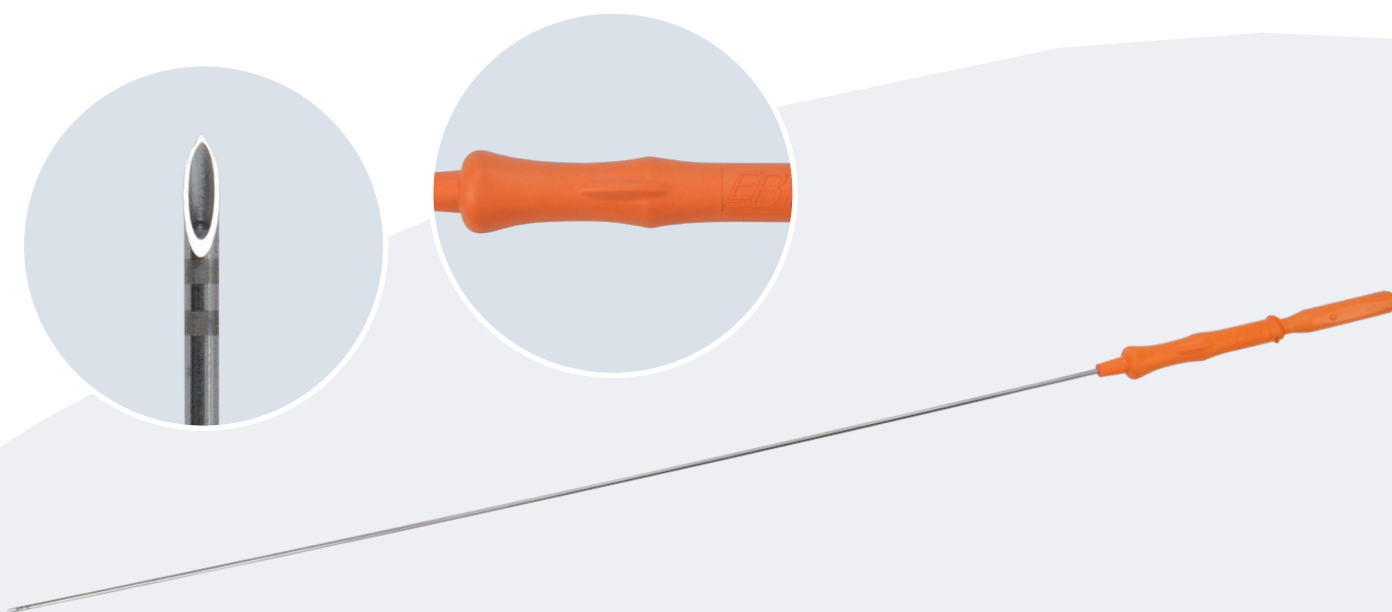

Référence	Désignation	Conditionnement	Ø ext.	Longueur	Stérilisation
EBT00030-BC	Aiguille de ponction d'ovocytes 1.4 B.C. Avec mandrin	Boîte de 10 unités Sachet individuel	17 G (1.4 mm)	30 cm	γ irradiation
EBT00030-BC-0	Aiguille de ponction d'ovocytes 1.4 B.C. Sans mandrin	Boîte de 10 unités Sachet individuel	17 G (1.4 mm)	30 cm	γ irradiation