

ELLIOCATH S®

Cathéter de transfert coudé échogène

CARACTÉRISTIQUES

- Cathéter pré-courbé, terminé par un bulbe atraumatique échogène :
 - permettant un passage facile et atraumatique du canal cervical,
 - facilitant le positionnement.
- Repères tactiles sur l'embase indiquant l'orientation de la courbure.
- Bague ajustable atraumatique facile à utiliser.
- Jeu de 4 étiquettes de traçabilité.

UTILISATION

- Transfert d'embryons.

RECOMMANDATIONS

- Avant toute utilisation, il est recommandé de rincer le cathéter avec un milieu de culture stérile approprié.
- Placer les embryons dans ELLIOCATH S® avec une faible quantité de milieu de culture.
- Positionner la bague sur la graduation centimétrique selon la longueur de l'utérus.
- Introduire ELLIOCATH S® à environ 1 cm du fond utérin. En cas de passage difficile du col, effectuer délicatement une rotation du cathéter.
- Procéder au transfert d'embryons.
- Retirer doucement le cathéter.



Référence	Désignation	Conditionnement	Ø int.	Longueur	Stérilisation
EBT018-KT-S	ELLIOCATH S®	Boîte de 25 unités Sachet individuel	1.1 mm	20.5 cm	γ irradiation