

# HYSOKAT

Hystérosonographie - Hystero-salpingo-foam-sonographie (HyFoSy)

## CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif d'exploration fonctionnelle composé de :
  - 1 cathéter central souple pré-coudé avec repères centimétriques et repères tactiles sur l'embase indiquant l'orientation de la courbure.
  - 1 gaine externe, mobile pourvue à son extrémité distale d'un cône **très souple atraumatique** destiné à obturer l'exocol, fixée sur une bague facilitant ainsi la manipulation.


## UTILISATION

- Hystérosonographie - Hystero-salpingo-foam-sonographie (HyFoSy)

## RECOMMANDATIONS

- Insérer HYSOKAT dans l'utérus à la profondeur souhaitée.
- Pousser la gaine externe jusqu'à la fermeture du col par le cône souple.
- Injecter doucement la préparation choisie.
- Retirer doucement le dispositif en fin de procédure.

NOV18

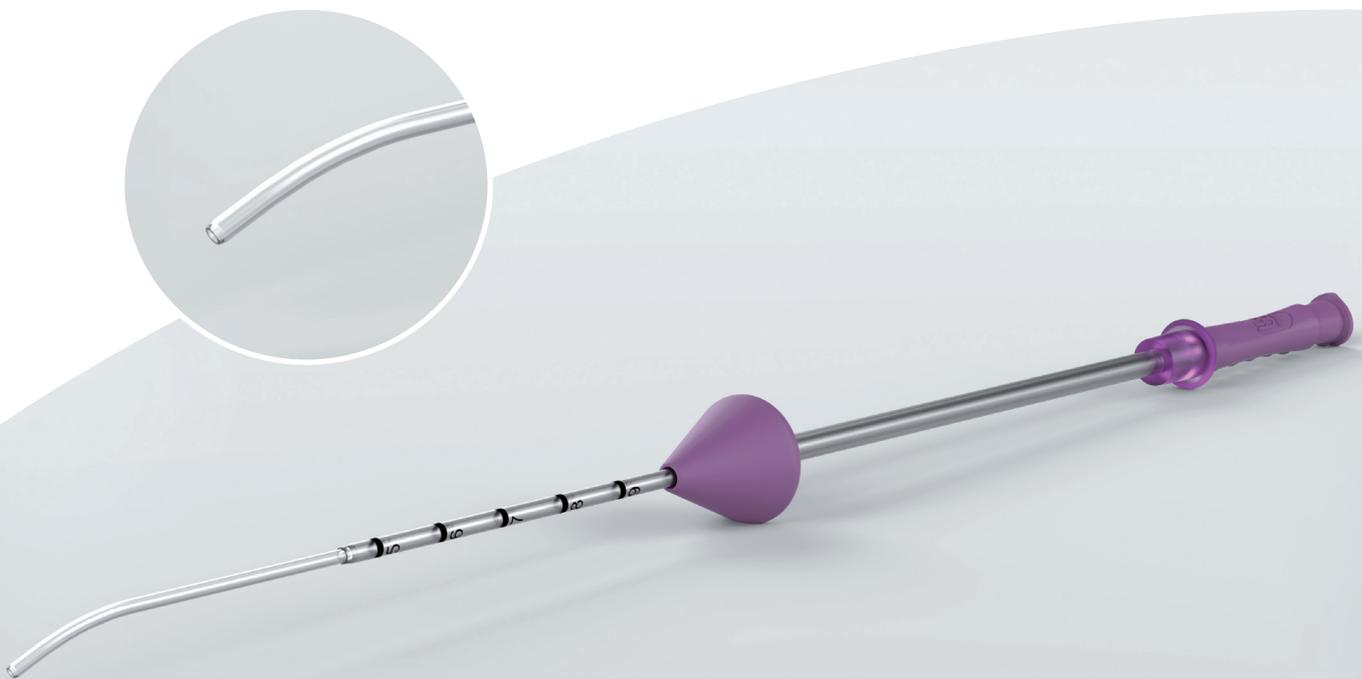

Référence	Désignation	Conditionnement	Longueur	Stérilisation
EBT01700	HYSOKAT	Boîte de 25 sachets individuels	24,5 cm	Oxyde d'éthylène